

クーデックエイミーPCA システム連携用アプリケーション

Amy Viewer Desktop インストールガイド(ダウンロード版)

※このインストールガイドでは、Windows10 搭載 PC を例に説明しています。OS バージョンの違い、又は環境設定の違いにより、表示や操作方法等が記載と異なる場合があります。詳細に関しては、ご利用機器の取扱説明書をご確認ください。

- (1) ダウンロードページにコムタッチ製造番号とパスワードを入力し、Amy Viewer Desktop のソフトウェアマスタ(V*.**_AmyViewerSetup_Release.zip)をダウンロードします。

Amy Viewer Desktop
CAA-V100
Verion 1.1.1 (最新リリース)

本品 (Amy Viewer Desktop) はPC にインストールして使用するWindows用アプリケーションです。エイミーPCA用の専用アプリであるエイミーズウィンドウとエイミーPCA拡張アプリケーションと連携して動作します。Amy拡張アプリによってファイルサーバに保存された動作履歴情報を、本品から確認することができます。

インストール方法はこちらを確認してください。

コムタッチ製造番号:

パスワード:

[Download](#)

機種ID	製造番号	IPアドレス	接続日時	接続時間 (min)	PC 接続時間 (min)	PC 接続回数	動作履歴 (件数)
12345	230210001	00000024	2/10 09:26	1.0	1.0	005	5
abcde	230210001	00000076	2/10 09:27	0.5	0.5	005	10
10912	230210001	00000220	2/10 14:41	1.0	1.0	005	5

コムタッチ製造番号とパスワードは、コムタッチの裏面に記載があります。




- (2) [V*.**_AmyViewerSetup_Release.zip]を任意のフォルダに解凍します。

(3) 解凍したフォルダ以下に作成される[setup.exe]をダブルクリックします。

※.NET Framework 4.7.2 のインストールを求められる場合があります。ライセンス条項を確認のうえ同意し、画面のガイドに従ってインストールを実行してください。インストールの際に変更の許可、又は再起動を求められる場合があります。




(4) [次へ]をクリックします。

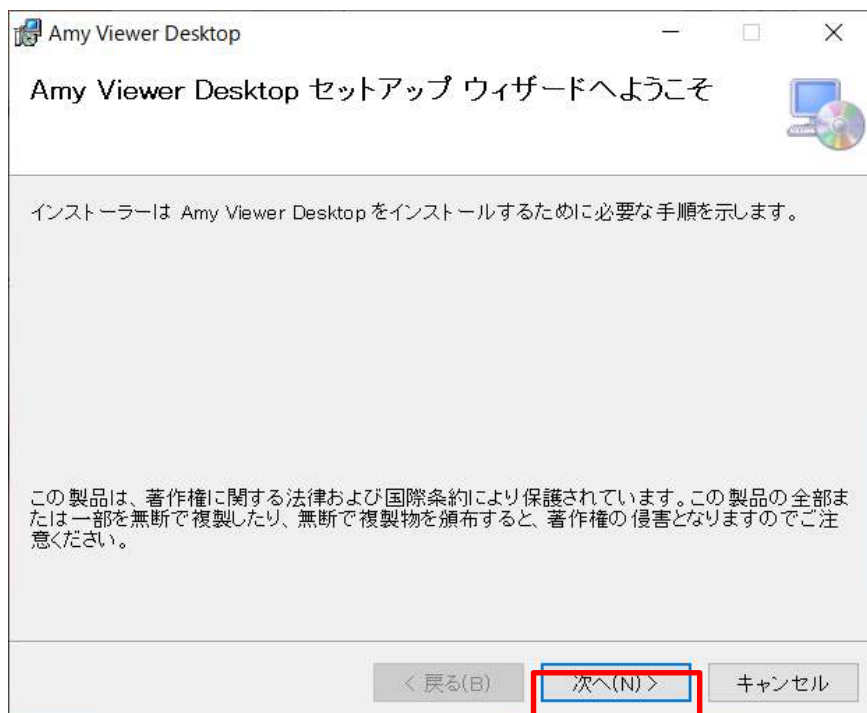


(5) [次へ]をクリックします。

※必要に応じてフォルダを変更してください。

※デフォルト設定ではログインユーザの環境のみにインストールされます。PC 内の全ユーザで使用できるようにするには[すべてのユーザー]を選択してください。

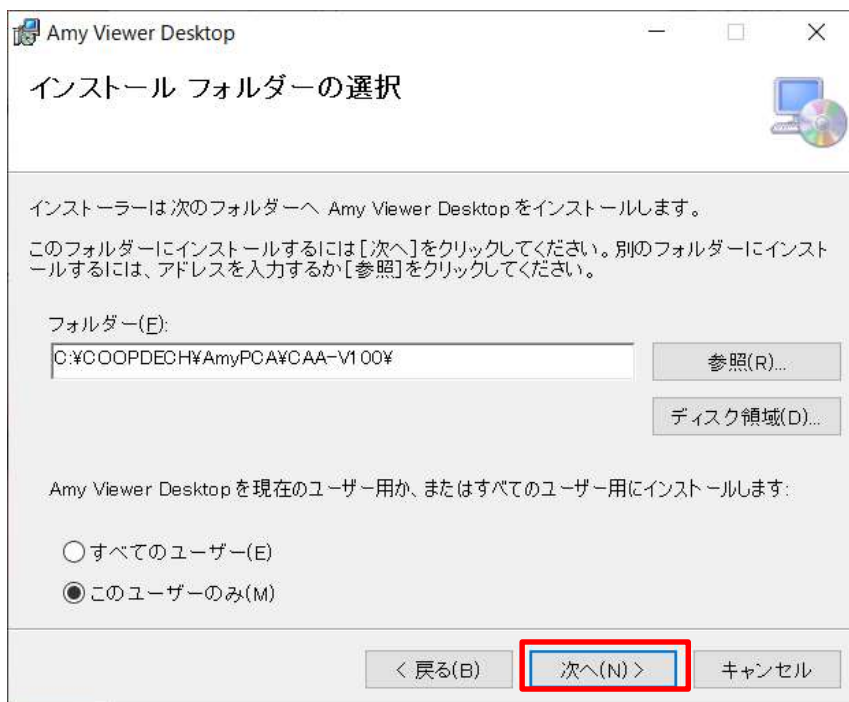

(6) [次へ]をクリックします。

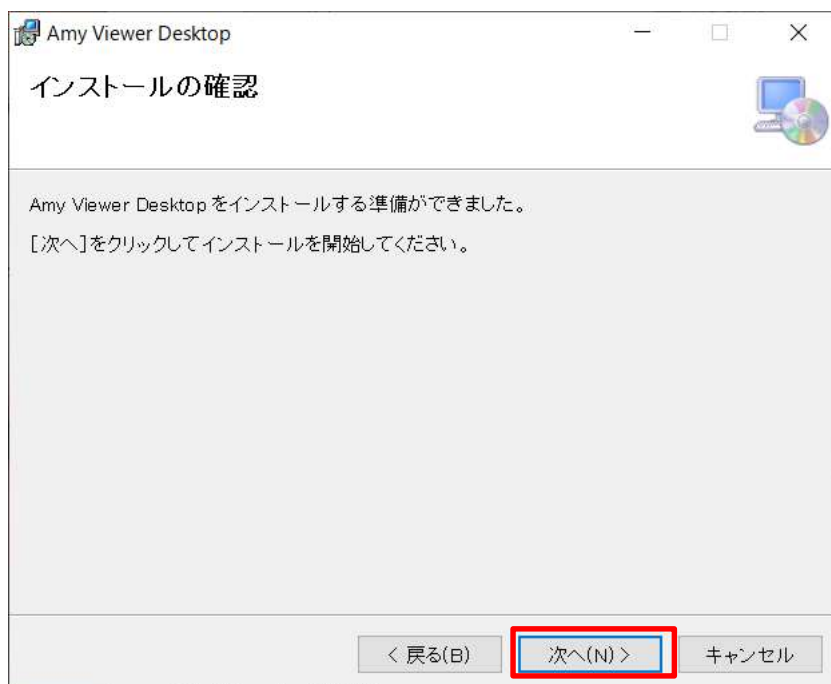


(7) ソフトウェア利用許諾契約を確認しご理解いただいた上で[同意する]を選択し、[次へ]をクリックします。

※[次へ]をクリックするとインストールが開始します。

※インストールには数分程度時間がかかる場合があります。完了するまでしばらくお待ちください。



(8) [閉じる]をクリックします。

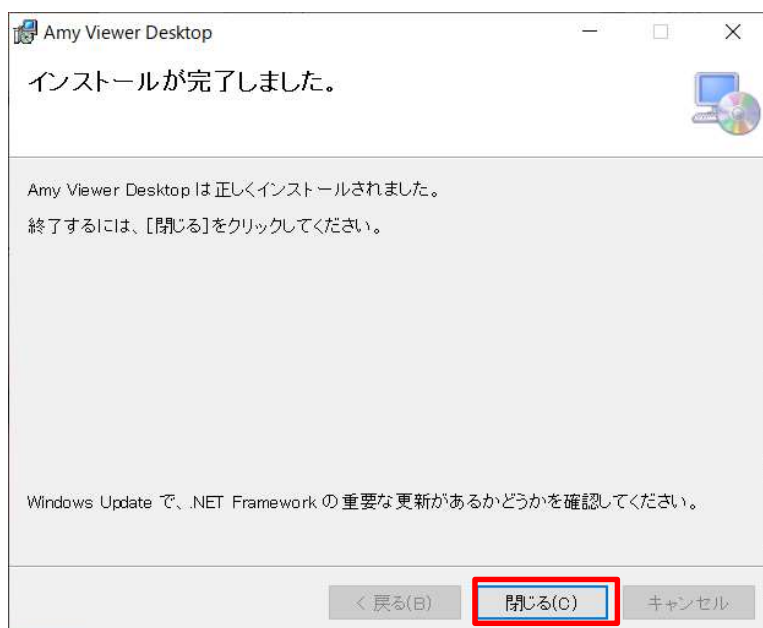

以上でインストールは終了です。